



Na escolha da biblioteca, será disponibilizada algumas opções:

A imagem a seguir mostra o tipo de conexão e a forma do escaneamento.

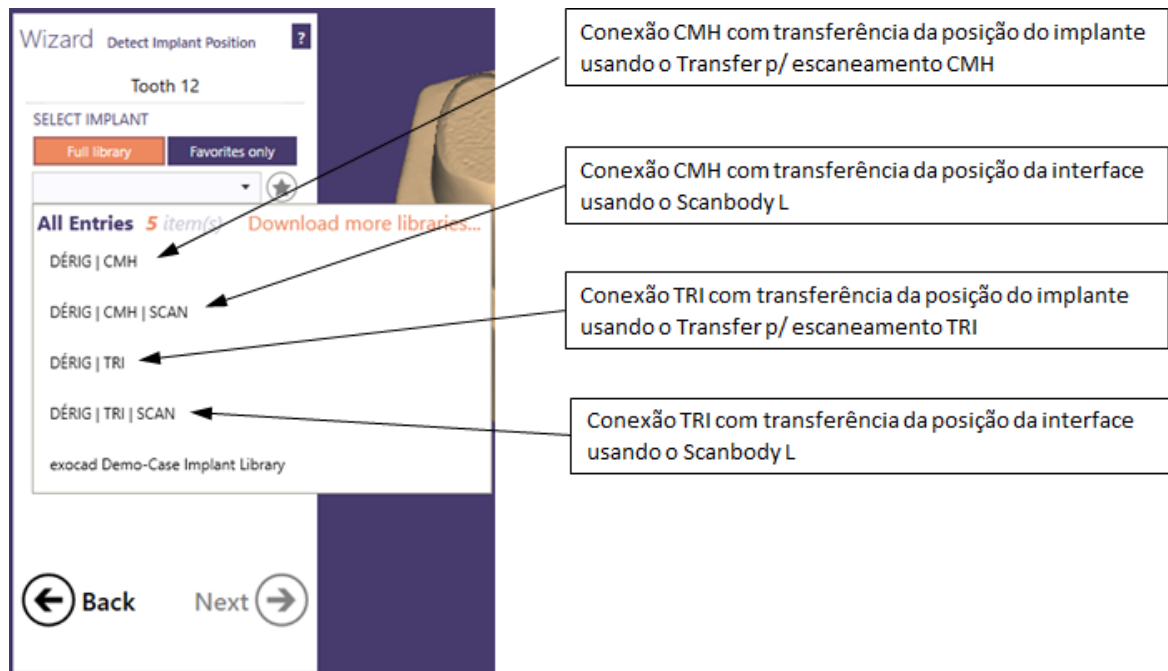

A próxima seleção será a do modelo da interface.

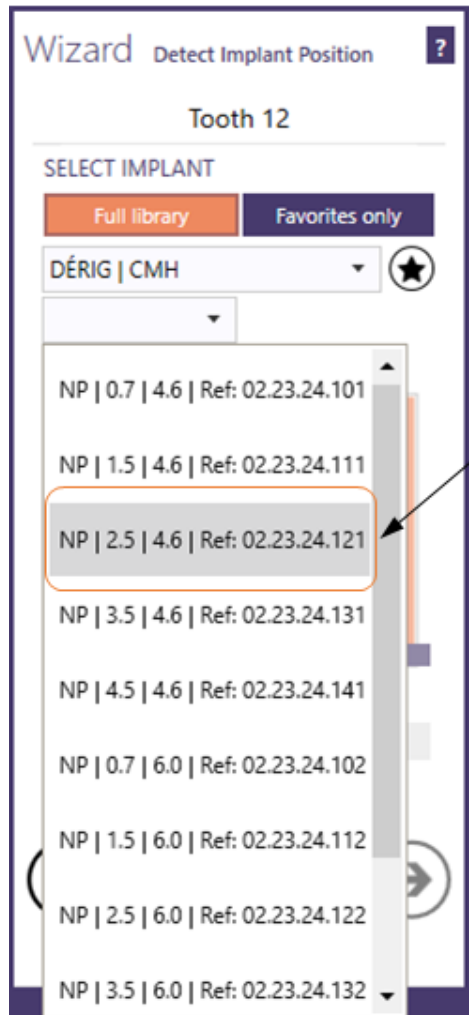

A seleção indica uma transferência da posição do implante usando o Transfer para escaneamento e uma interface modelo CMH NP cinta de 2,5mm com altura de corpo de 4,6mm. Código do produto é o 02.23.24.121.

NP | 2.5 | 4.6 | Ref: 02.23.24.121


Código da Interface


Altura do corpo da Interface em mm

Altura da cinta da Interface em mm

Código referente ao tamanho da plataforma conectiva

A lista acima é devido aos modelos disponíveis no sistema, como as variações de cinta e altura de corpo

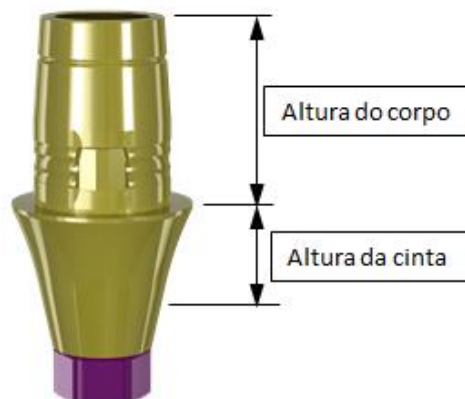


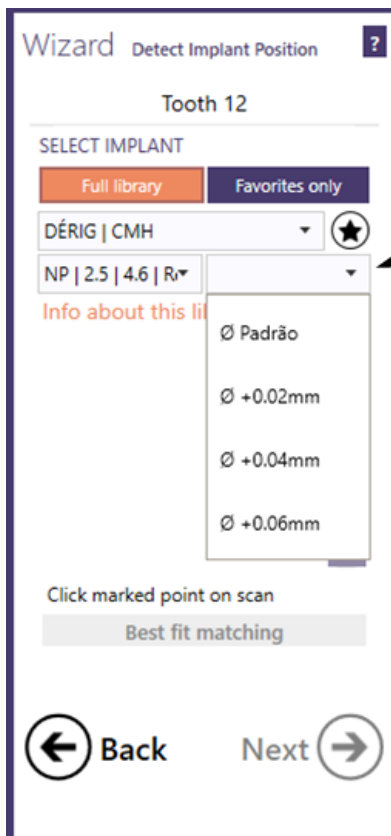



Nesse campo pode ser escolhido a folga que se deseja para o material adesivo.

O "Ø Padrão" é considerado sem folga

Após essa escolha, é só clicar na parte indicada e depois no melhor ajuste:

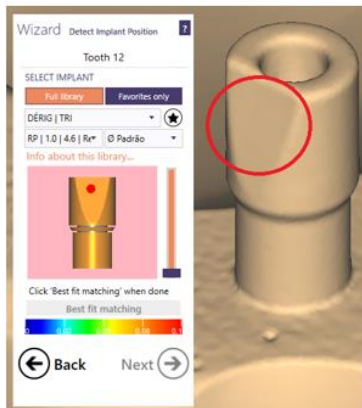

No exemplo ao lado, usando o Transfer para Escaneamento

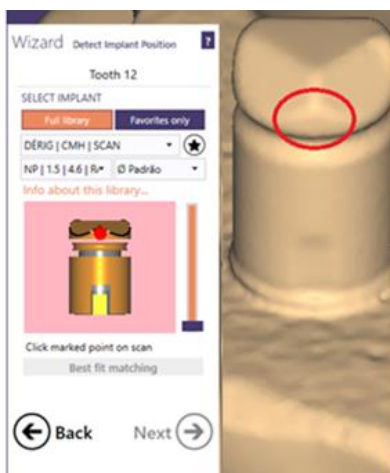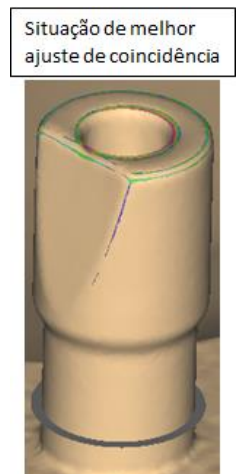

No exemplo ao lado, usando o Scanbody L

