



Procedimento para Instalação da Biblioteca EXOCAD CAD/CAM Dérig

Após o download do arquivo em seu computador, você deve extrair os arquivos para EXOCAD_DERIG_V8 em uma pasta de sua preferência.

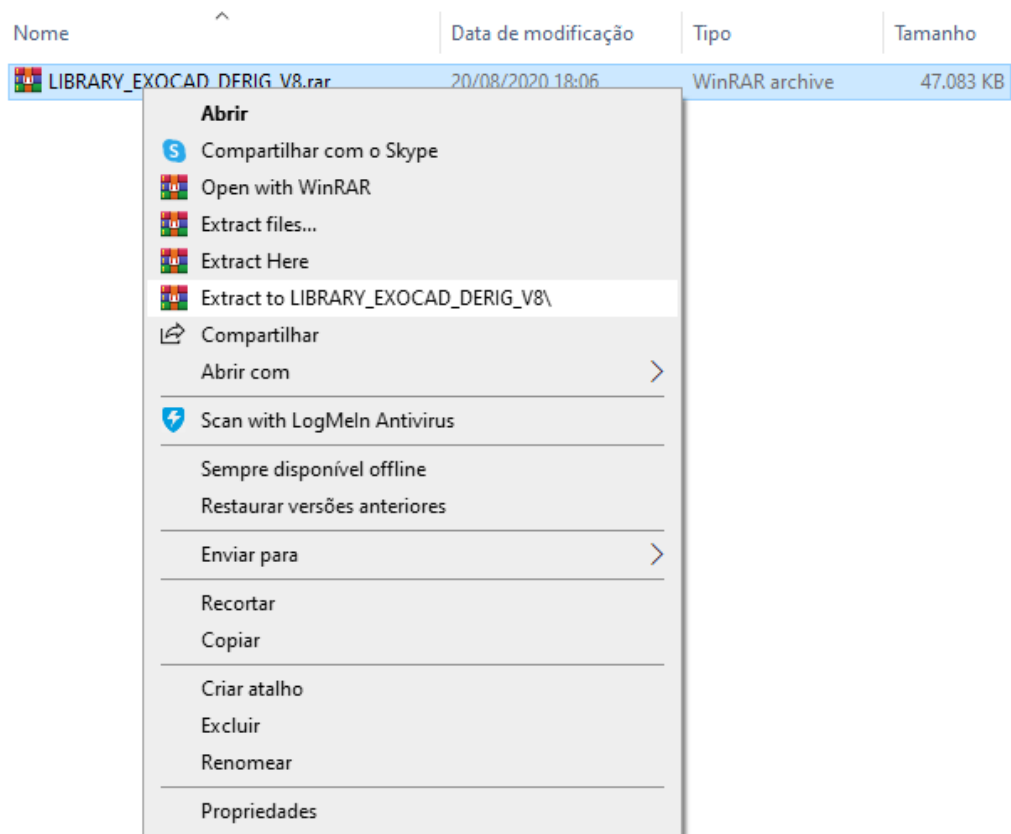

Será criado uma pasta conforme abaixo:

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
LIBRARY_EXOCAD_DERIG_V8	02/02/2021 16:45	Pasta de arquivos	
LIBRARY_EXOCAD_DERIG_V8.rar	20/08/2020 18:06	WinRAR archive	47.083 KB

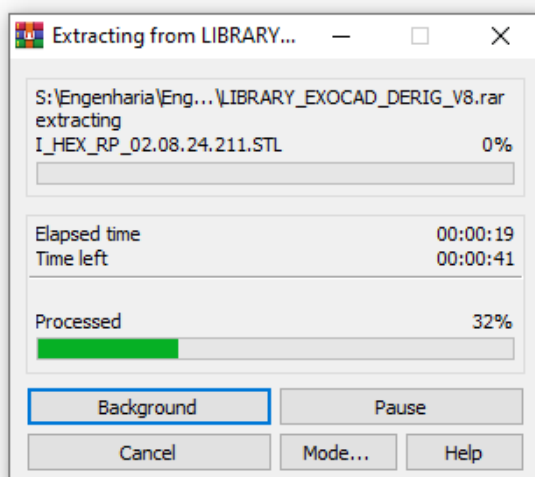


IMPORTANTE: Não se esqueça do local onde foi criada essa pasta. EXOCAD_DERIG_V8

Para a instalação:


Na área de trabalho, clique com o botão direito do ícone do programa.



Vá em “propriedades”;

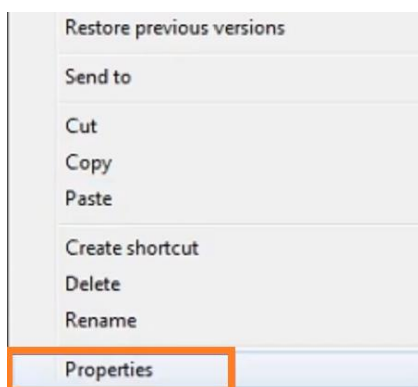


E clique em “Open file Location”.

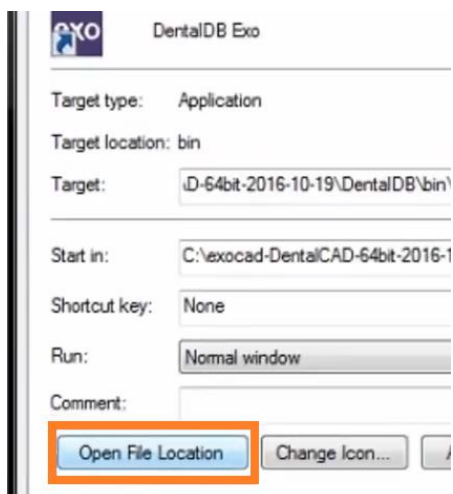


Então será mostrado o local de instalação do programa na sua máquina, ou seja, a pasta raiz.


Volte para dentro da pasta raiz.

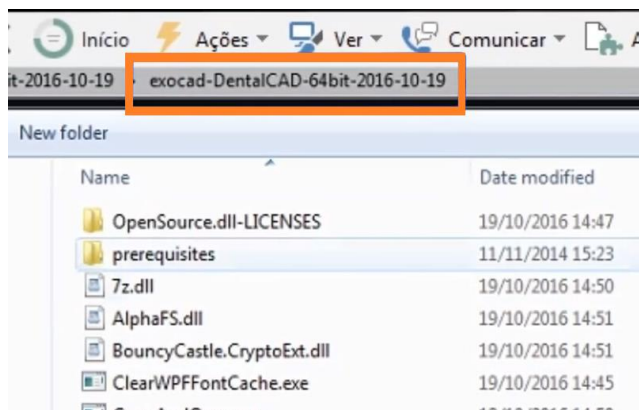



E entre na pasta “**DentalCADApp**”; (No programa Ceramill, entrar na pasta “**CAD**”).

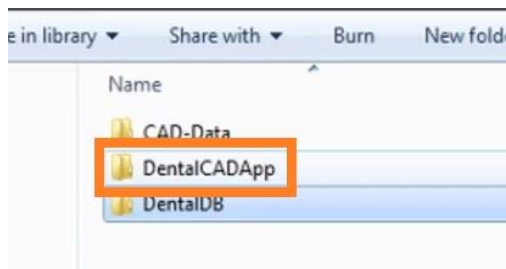


Após isso, entre na pasta “**library**”;

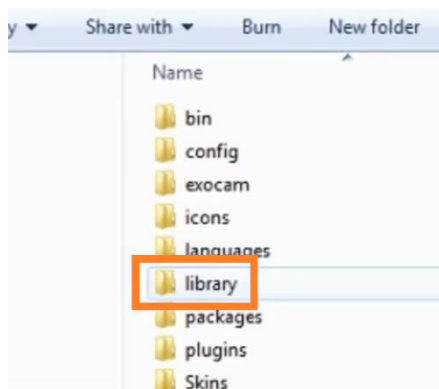

Em seguida na pasta “**implant**”;

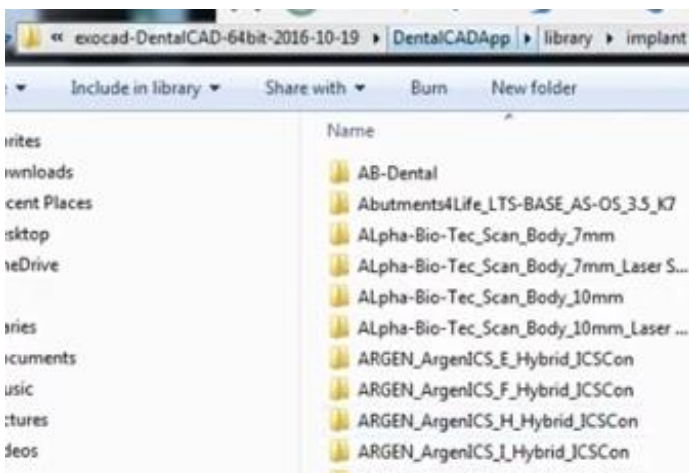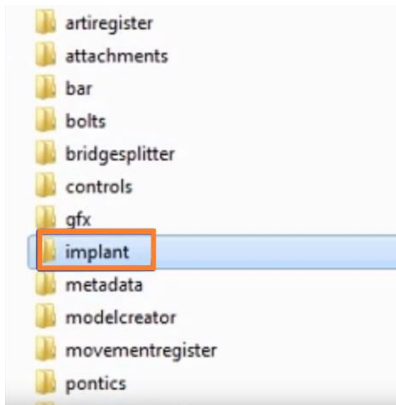


Agora acesse o local do download da biblioteca Dérig, onde você extraiu os arquivos, entre na pasta “EXOCAD_DERIG_V8”, depois em “EXOCAD” e então na pasta “**implant**”.

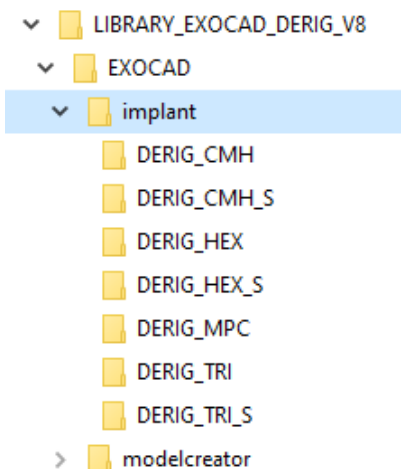


Copie todas as pastas (DERIG_CMH / DERIG_CMH_S / DERIG_HEX / DERIG_HEX_S / DERIG_MPC / DERIG_TRI / DERIG_TRI_S) e cole dentro da pasta “**implant**” do seu software.


A seguir, volte para a pasta “**library**”;

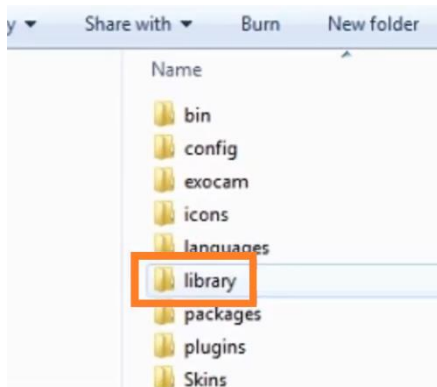


E então entre em “**modelcreator**”;

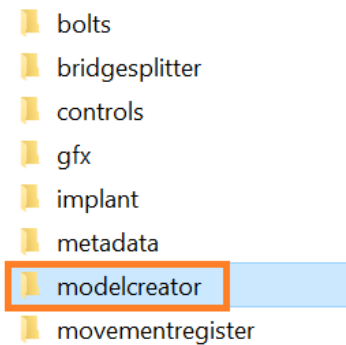

Em seguida acesse a pasta “**implants**”;

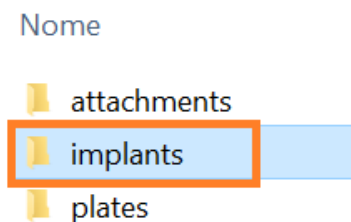

Agora acesse o local do download da biblioteca Dérig, onde você extraiu os arquivos, entre na pasta “EXOCAD_DERIG_V8”, depois em “EXOCAD” depois na pasta “modelcreator e então na pasta “implants”.

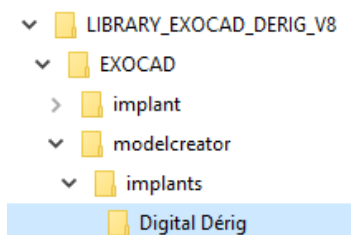

Copie a pasta (Digital Dérig) e cole dentro da pasta “implants” que está dentro da pasta modelcreator do seu software.

exocad-DentalCAD-64Bit-2019-02-20 > exocad-DentalCAD-64Bit-2019-02-20 > DentalCADApp > library > modelcreator > implants >

PRONTO, agora você poderá usar a biblioteca Dérig.