

GUIA DE TORQUE

Implantes e componentes protéticos



REFERÊNCIA TÉCNICA | DÉRIG IMPLANTES DO BRASIL

VALORES RECOMENDADOS

Torque de inserção

Referência por família e plataforma



BIONECK CMH

NP

45 Ncm



DYNAMIC CMH

NP

45 Ncm



BIONECK TRI

NP 3,5

35 Ncm

RP 4,3 · UP 5,0

45 Ncm



BIODENT

NP 3,3

35 Ncm

RP 3,75 · UP 5,0

45 Ncm



KORT

NP 4,0

35 Ncm

RP 5,0

45 Ncm

VALORES RECOMENDADOS

Componentes protéticos

Aperto controlado de 10 a 20 Ncm

10

Ncm

TORQUE MÁXIMO



Parafusos de Cobertura

15

Ncm

COMPONENTES DE MOLDAGEM E PROVISÓRIOS



Pilar de Cicatrização



Tampa de Proteção MPC



Transferentes do Implante



Transferente do MPC



Coping Provisório MPC



Coping CoCr MPC

20

Ncm

PILARES CÔNICOS



Mini Pilar Cônico Angulado



Mini Pilar Cônico Reto

35

Ncm

Pilares, provisórios e interfaces



Pilar Estético Reto



Pilar Estético
Angulado



Pilar Estético
Divergente



Pilar Estreito



Pilar Provisório Ti



Ucla CoCr



Interfaces



GUIA DE TORQUE

IMPLANTES E COMPONENTES PROTÉTICOS