


dérig
Implantes do Brasil

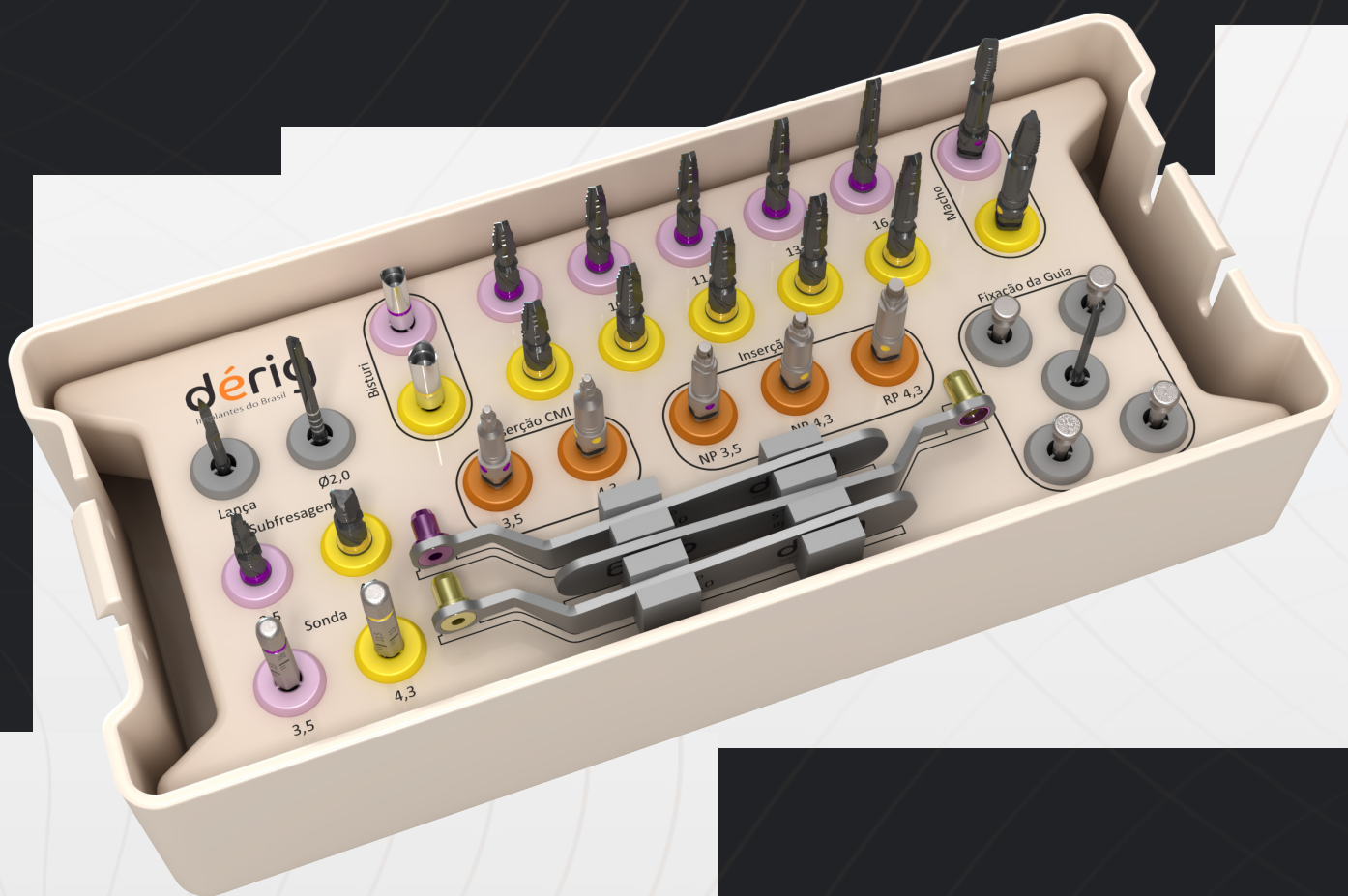

DÉRIG GUIDE

DÉRIG GUIDE

FAÇA PARTE DESTA MUDANÇA DE PARADIGMA

Instalar implantes sem abertura de retalho, em uma cirurgia limpa, rápida e proporcionando um pós-operatório confortável ao paciente, este é o objetivo do Dérig Guide.

Com imagens em três dimensões geradas por exames de escaneamento intraoral, é possível planejar a instalação de implantes com o auxílio de softwares especializados e obter o guia cirúrgico. Assim, antes mesmo do início do procedimento, o cirurgião já tem um profundo conhecimento da anatomia do paciente e a adequada posição dos implantes. O Dérig Guide aumenta a precisão na instalação dos implantes e a qualidade das reabilitações sobre implantes.

O conceito de planejamento tridimensional com o Dérig Guide é baseado na excelência do conhecimento científico atual e no equilíbrio entre tecnologia de ponta e a necessidade clínica de cada paciente, transportando o planejamento digital para o campo cirúrgico com precisão.

PASSO A PASSO

1. Exame clínico
2. Exames radiográficos e tomográficos
3. Planejamento virtual da cirurgia
4. Confeção do guia cirúrgico
5. Cirurgia guiada

VANTAGENS

- **Cirurgia sem abertura de retalho, com baixa morbidade no pós-cirúrgico**

Com um procedimento menos invasivo, os dias após a cirurgia são muito mais confortáveis para o paciente, com menos sangramento, edema e dor.

- **Economia de tempo**

O Dérig Guide oferece uma recuperação mais rápida e um menor tempo total de tratamento.

- **Maior segurança**

O Dérig Guide proporciona a oportunidade de realização de um *hands-on* com um modelo do próprio paciente, o que minimiza a possibilidade de erros na posição dos implantes e acidentes trans cirúrgicos.

- **Maior precisão**

Das osteotomias até a instalação dos implantes, todos os passos são precisos e baseados no planejamento digital.

- **Permite subfresagem**

A técnica aumenta a estabilidade primária dos implantes.

- **Simplificação e previsibilidade da fase protética**

As imagens virtuais e a construção do guia cirúrgico fornecem a exata posição do implante e facilitam o trabalho protético.

KIT DÉRIG GUIDE - PROTOCOLO CÔNICO

SOLUÇÃO EXCLUSIVA DÉRIG PARA CIRURGIAS GUIADAS SIMPLIFICADAS

Sempre com o conhecimento científico atual e incorporando alta tecnologia, a Dérig apresenta o Kit Dérig Guide para a instalação de implantes. Este Kit foi desenvolvido por especialistas em implantologia, imagiologistas, engenheiros, protesistas, técnicos em prótese dentária e diferentes pesquisadores.

Após uma longa sequência no desenvolvimento do Kit, este foi utilizado e testado por vários grupos de especialistas, o que permitiu a otimização do fluxo de tratamento com aumento da qualidade do trabalho desenvolvido.

DIFERENCIAIS

- **Simplicidade**

O protocolo de uso do Kit Dérig Guide é didático, com redução de instrumentais de forma inteligente, mantendo a mesma função e eficácia comparado a kits mais complexos.

- **Brocas individuais para cada medida de implante, com *stop* na própria broca**

O preparo dos sítios de osteotomia é mais fácil e mais preciso.

- **As reduções são usadas apenas na broca lança Ø2 e no procedimento de subfresagem**

As brocas são guiadas diretamente pelas anilhas, permitindo que o profissional não necessite segurar a redução durante todo o procedimento.

- **Fixação do Guia Cirúrgico Dérig, feita por pinos com encaixes cônicos**

Melhor estabilidade na fixação.

- **Canais helicoidais nos corpos das brocas que canalizam a irrigação**

O inovador design das brocas, que facilita a irrigação no sítio de osteotomia, evita o superaquecimento durante o procedimento cirúrgico.

- **Diminuição do tempo cirúrgico**

Além do ganho em tempo característico da Cirurgia Guiada, o tratamento apresenta economia de tempo relacionada à simplicidade no uso do Kit.

CÓDIGOS

Código	Descrição
02.01.10.009	Kit Dérig Guide Protocolo Cônico
02.01.41. 001	Broca Lança Guiada Ø2,0 x 8
02.01.41.002	Broca Guiada Ø2,0 x 16
02.01.41.008	Broca Cônica Guiada Sub 3,5 x 8
02.01.41.108	Broca Cônica Guiada 3,5 x 8
02.01.41.110	Broca Cônica Guiada 3,5 x 10
02.01.41.111	Broca Cônica Guiada 3,5 x 11,5
02.01.41.113	Broca Cônica Guiada 3,5 x 13
02.01.41.116	Broca Cônica Guiada 3,5 x 16
02.01.41.200	Broca Cônica Guiada Sub 4,3
02.01.41.208	Broca Cônica Guiada 4,3 x 8
02.01.41.210	Broca Cônica Guiada 4,3 x 10
02.01.41.211	Broca Cônica Guiada 4,3 x 11,5
02.01.41.213	Broca Cônica Guiada 4,3 x 13
02.01.41.216	Broca Cônica Guiada 4,3 x 16
02.01.41.350	Macho Guiado 3,5
02.01.41.430	Macho Guiado 4,3
02.01.41.035	Bisturi Circular 3,5
02.01.41.043	Bisturi Circular 4,3
02.01.42.001	Chave de Inserção Guiada TRI NP 3,5
02.01.42.002	Chave de Inserção Guiada TRI NP 4,3
02.01.42.003	Chave de Inserção Guiada TRI RP 4,3
02.01.42.237	Chave de Inserção Guiada CMH NP 3,5
02.01.42.238	Chave de Inserção Guiada CMH NP 4,3
02.01.41.150	Broca Guia Ø1,5
02.01.42.006	Pino de Fixação Ø1,5
02.01.42.007	Redução 3,5 / Ø2,0
02.01.42.008	Redução 4,3 / Ø2,0
02.01.42.009	Redução 4,3 / 3,5
02.01.42.010	Sonda de Profundidade 3,5
02.01.42.011	Sonda de Profundidade 4,3
02.01.10.001	Torquímetro Universal
02.01.11.057	Chave Adaptadora TQ
06.01.02. 197	Caixa Autoclavável para Kit Dérig Guide Protocolo Cônico



DOA
COMM

dérig
Implantes do Brasil

Dérig Ind. e Com. de Mat. Médico - Odontológicos Ltda

📍 Rua Lapa, 479 | Chácara Marco | Barueri, São Paulo | 06419-020

☎ 0800 777 1991 | 11 4161 8090

✉ derig@derig.com.br | vendas@derig.com.br

🌐 derig.com.br

Válido de 29 de agosto de 2022 até a publicação do novo folder.

©Dérig Implantes do Brasil, 2018. Todos os direitos reservados. Dérig Implantes do Brasil® e/ou outras marcas comerciais e logotipos de Dérig Implantes do Brasil® e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. As imagens de produtos não estão necessariamente em escala. Alguns produtos podem não estar aprovados/liberados pelo órgão regulatório em todos os mercados. Por favor, entre em contato com o escritório de vendas local da Dérig Implantes do Brasil® para mais informações sobre disponibilidade dos produtos. Versão 1: agosto de 2022. R.T. Edson/Aparecido Meronho | CREA SP 5063423447